



## Prosthetic Cleanser von Alps

### Beschreibung

der Liner nimmt kein Wasser auf. Er kann mit einem Handtuch nach dem Reinigen von innen ausgetrocknet werden und anschliessend auf dem mitgelieferten Schaumstoff für die Nacht gelagert werden, damit er die Form behält. Die Reinigungs lotion ist für Liner und Stumpf. nur parfümfreie und ölfreie Seifen und Cremes benutzen, zusätzlich 1-3 mal wöchentlich mit Alkohol auswischen (Isopropyl-Alkohol erhältlich in der Apotheke)

### Anwendung

der Alps-Liner aus Styrol-Gel wird direkt auf der Haut getragen und muss deshalb, wie der Stumpf, sorgfältig mit geeignetem Pflegemittel mindestens 1x täglich (abends) gereinigt werden

